

# Modifizierbare Sekundärparameter und Optionen

Paramètres secondaires modifiables et options

Modifications secondary parameters and options

	$\varnothing_{a0}$ Durchmesser der optischen Zone Diamètre optique <i>Optical zone diameter</i>	$l_{EA}$ Abflachung Dégagement <i>Flattening</i>	$t_c$ Mittendicken-änderung Modification épaisseur au centre <i>Center thickness modification</i>	$t_{ER}$ Randdicke Épaisseur au bord <i>Periphery curve</i>	LB Höckerlänge Longueur des bosses <i>Bumps lenght</i>	HB Höckerhöhe Hauteur des bosses <i>Bumps height</i>	DB Höckerverschiebung (Lidstellung) Décalage des bosses (position des paupières) <i>Bumps shift (eyelid position)</i>
<b>Grund der Parametermodifikation</b> Objectifs de la modification du paramètre <i>Reasons of the parameter modification</i>	<b>Reduzieren von Halos oder der Kontaktlinsendicke</b> Réduction des halos ou de l'épaisseur de la lentille <i>Halo reduction or contact lens thickness</i>	<b>Sitzveränderung in der Peripherie</b> Modification de l'assise en périphérie <i>Modification of the peripheral seat</i>	<b>Steifigkeit und Stabilität der Kontaktlinse. Verbesserung des Visus</b> Rigidité et stabilité de la lentille. Amélioration de l'acuité visuelle <i>Rigidity and stability of the contact lens. Acuity improvement</i>	<b>Steifigkeit und Stabilität der Kontaktlinse. Verbesserung der Reißfestigkeit</b> Rigidité et stabilité de la lentille. Augmentation de la résistance à la déchirure <i>Rigidity and stability of the contact lens. Improvement of the resistance to breakage</i>	<b>Bei grosser oder kleiner Lidöffnung</b> Action sur la stabilisation en cas de grande ou petite ouverture palpébrale <i>Action on stabilisation in case of large or small eyelid aperture</i>	<b>Bei schwacher oder starker Lidspannung</b> Action sur la stabilisation en cas de forte ou faible tension palpébrale <i>Action on stabilisation in case of strong or weak eyelid tension</i>	<b>Bei abnormaler Lidposition</b> Action sur la stabilisation en cas de position palpébrale anormale <i>Action on stabilisation in case of abnormal eyelid position</i>
<b>Orbis</b>	7.00 => 9.00 mm	– Standard – – Einkurvig / Mono-courbe / Monocurve + Stark / Fort / Strong	–0.03 => +0.20 mm	0.08 => 0.16 mm (Standard 0.10 mm / SiH 0.12)			
<b>Toris Ext Int</b>					✓	✓	✓
<b>Toris Bal</b>						✓	
<b>Borelis</b>							
<b>Torelis Ext Int</b>					✓	✓	✓
<b>Torelis Bal</b>						✓	
<b>HydroCone</b>	5.00 => 7.50 mm		Siehe S. 17 / Voir p. 17 / See p. 17	0.08 => 0.16 mm (Standard 0.10 mm / SiH 0.12)	✓	✓	✓
<b>HydroMed</b>		Siehe S. 19 / Voir p. 19 / See p. 19	Siehe S. 19 / Voir p. 19 / See p. 19		✓	✓	✓
<b>Orbiflex</b>	7.00 => 8.00 mm (SA) 6.00 => 8.00 mm (SZA) 7.00 => 8.60 mm (S3S)	Siehe S. 27 / Voir p. 27 / See p. 27	–0.03 => +1.00 mm				
<b>Boriflex</b>							
<b>FlexCone</b>							
<b>FlexMed</b>	5.00 => 7.50 mm	Siehe S. 33 / Voir p. 33 / See p. 33					

## Optionen nach Wunsch

- Gravur der Seriennummer (SN)
- Punktmarkierung der rechten Kontaktlinse

## Options sur demande

- Gravage du numéro d'identification (SN)
- Pointage de la lentille droite

## Options on request

- Serial number (SN) engraving
- Right contact lens marking